


Kurzanleitung

SleepDoc Porti® 7 / 9

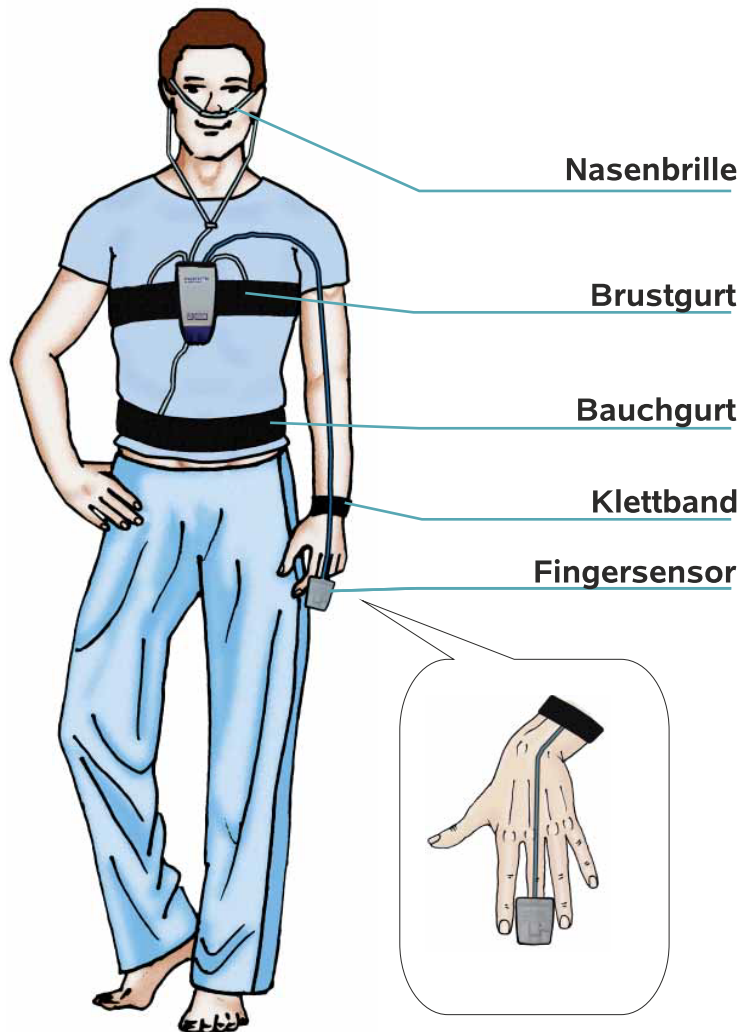

⚠ ACHTUNG!

Es darf auf keinen Fall mit dem Gerät oder den Sensoren gebadet oder geduscht werden.
Vor dem Händewaschen muss der Fingersensor sicher abgelegt werden.
Die Gebrauchsanleitung ist unbedingt zu beachten!

Kurzanleitung für den Patienten

Bitte auch die Rückseite beachten!

1. Das **Porti** mit dem elastischem Gurt über der Schlafkleidung so befestigen, dass das Porti in Rückenlage waagrecht liegt. Der **Brustgurt** sollte nicht zu fest sein, jedoch auch nicht verrutschen können.
2. Den **Bauchgurt** in Höhe des Bauchnabels um den Bauch befestigen. Das Druckkissen muss zum Körper hin zeigen.
3. Einen der drei mittleren Finger so in die graue Manschette des **Fingersensors** stecken, dass das Bild mit dem Nagel nach oben zeigt und das Kabel über den Handrücken verläuft. Sensorkabel mit dem **Klettarmband** am Handgelenk befestigen. Nach Möglichkeit den Mittelfingernagel ganz kurz schneiden. Evtl. vorhandenen Nagellack (auch Klarlack) entfernen.
4. Die **Nasenbrille** an der Nase anbringen und hinter die Ohren klemmen, evtl. mit einem Klebeband an den Wangen fixieren. Den Schlauch auf den blauen Adapterschlauch am Portigerät stecken.

Bei Maskenträgern muss der CPAP-Adapterschlauch zwischen Maske und Schlauch gesteckt werden (die Sauerstoffbrille entfällt).
5. Die Aufzeichnung beginnt automatisch zum vorher in der Praxis festgelegten Zeitpunkt. **Es muss kein Knopf gedrückt werden.**

Zur Kontrolle

- Porti 7:** Wenn der Fingersensor korrekt gesteckt ist, erlischt die rote LED, die grüne LED leuchtet alle 4 Sekunden kurz auf.
- Porti 9:** Das Display schaltet sich nach kurzer Zeit aus, es ist dann nur noch ein roter Punkt (Aufnahme) zu sehen. Sollte der Fingersensor nicht korrekt angelegt sein, dann erscheint der Schriftzug *SpO2* im Display.

Nach dem Zubettgehen:

Nochmals den Sitz aller Sensoren und deren Anschluss überprüfen.

Am nächsten Morgen:

Gerät mit Sensoren vom Körper entfernen, alle Teile zurück in den Koffer legen und den kompletten Koffer wieder in die Praxis bringen.

Die Reinigung der Sensoren erfolgt durch das Praxis-Personal!

Das SleepDoc Porti und seine Sensoren sind hochempfindliche elektronische Geräte und müssen gegen Hitze und Nässe geschützt werden. Es darf auf keinen Fall mit dem Gerät oder den Sensoren gebadet oder geduscht werden. Vor dem Händewaschen muss der