

## Tastenkombinationen

### Auflösung

30-Sekunden-Ansicht	[1]	60-Sekunden-Ansicht	[2]
2-Minuten-Ansicht	[3]	5-Minuten-Ansicht	[4]
10-Minuten-Ansicht	[5]	20-Minuten-Ansicht	[6]
30-Minuten-Ansicht	[7]	1-Stunden-Ansicht	[8]
2-Stunden-Ansicht	[9]	4-Stunden-Ansicht	[0]
Zur nächsten Zeitbasis springen	[+] / [-] oder [Strg] + Mausrad		

### Ansichten/Bildschirme

Kanäle vergrößern	[Shift] + [Mausrad]
Nach unten scrollen (bei vergrößerten Kanälen)	[Strg] + [Shift] + Mausrad
Springen in erste Epoche	[Pos 1]
Springen in letzte Epoche	[Ende]
Ansicht vorwärts	[Bild↓]
Ansicht rückwärts	[Bild↑]
Nachtmodus	[Eingabetaste]
Aktuelle Seite drucken	6. Symbol von links
Gehe zu Epoche	[Strg] + [G]
Kommentar eintragen	[Strg] + Leertaste

### Respiratorische Ereignisse

Zentrale Apnoe	[Z]
Obstruktive Apnoe	[O]
Gemischte Apnoe	[G]
Hypopnoe	[H]
Cheyne-Stokes Atmung	[S]
Entsättigung	[E]
Habituelles Schnarchen	[H]
Obstruktives Schnarchen	[O]

### Neurologische Ereignisse

Respiratorisches Arousal	[R]
Beinbewegung	[M]
Periodische Beinbewegung	[P]

### Schlafstadienauswertung

Schlafstadium 1	[1]	REM	[R]	Beenden	[E]
Schlafstadium 2	[2]	Wach	[W]	Speichern	[S]
Schlafstadium 3	[3]	Artefakt	[A]	Hilfe	[H]