


Kurzanleitung SleepDoc Porti ®

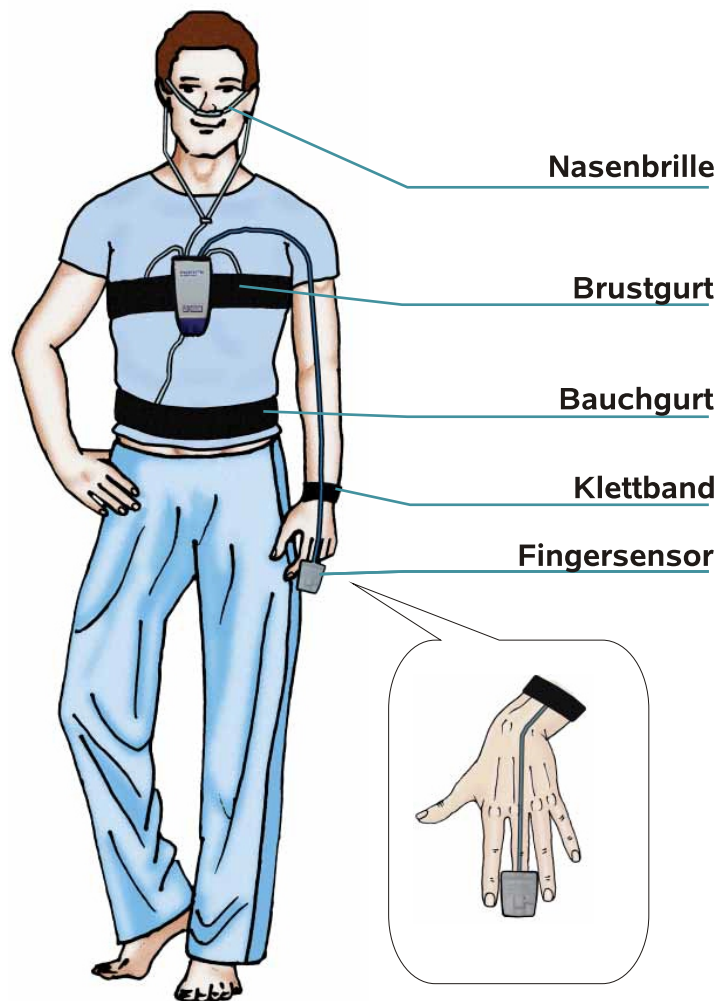

ACHTUNG!

Es darf auf keinen Fall mit dem Gerät oder den Sensoren gebadet oder geduscht werden. Vor dem Händewaschen muss der Fingersensor sicher abgelegt werden. Die Gebrauchsanleitung ist unbedingt zu beachten!

Kundenservice

0800-0267735*
0720-513510
+49 700 26773563
* gebührenfrei

Kurzanleitung für den Patienten Bitte auch die Rückseite beachten!

- Gerät mit elastischem Gurt über der Schlafkleidung so befestigen, dass das Porti in Rückenlage waagrecht liegt. Der Gurt sollte nicht zu fest sein, jedoch auch nicht verrutschen können.
 - Bauchgurt in Höhe des Bauchnabels um den Bauch befestigen. Das Druckkissen muss zum Körper hin zeigen.
 - Nach Möglichkeit den Mittelfingernagel ganz kurz schneiden. Evtl. vorhandenen Nagellack (auch Klarlack) entfernen. Den Finger so in die graue Sensorhülle stecken, dass das Bild mit dem Nagel nach oben zeigt und das Kabel über den Handrücken verläuft. Sensorkabel mit Klettbandstreifen am Handgelenk befestigen.
 - Die Sauerstoffbrille an der Nase anbringen und hinter die Ohren klemmen, evtl. mit einem Klebeband an den Wangen fixieren. Den Schlauch auf den blauen Adapterschlauch am Portigerät stecken.
- Bei Maskenträgern den CPAP-Adapterschlauch an der Maske befestigen. Dazu muss an der Maske ein kleiner Stopfen entfernt und der helle Plastikadapter des Sauerstoffschlauches bis zum Anschlag in die Öffnung der Maske gesteckt werden (die Sauerstoffbrille entfällt).
- Gerät einschalten (Schiebeschalter nach rechts).
 - Beide LEDs leuchten auf. Ist der Fingersensor richtig angelegt, erlischt die rote LED. Die grüne LED blinkt zu Kontrollzwecken im 4-Sekunden-Takt während der ganzen Nacht.
 - Nach dem Zubettgehen:
Nochmals den Sitz aller Sensoren und deren Anschluss überprüfen.
 - Am nächsten Morgen:
Gerät ausschalten (Schiebeschalter nach links). Alle Teile zurück in den Koffer legen und den kompletten Koffer wieder in die Praxis bringen.

Die Reinigung der Sensoren erfolgt durch das Praxis-Personal!

Das SleepDoc Porti und seine Sensoren sind hochempfindliche elektronische Geräte und müssen gegen Hitze und Nässe geschützt werden. Es darf auf keinen Fall mit dem Gerät oder den Sensoren gebadet oder geduscht werden. Vor dem Händewaschen muss der Fingersensor sicher abgelegt werden.

Bitte Gerät unter keinen Umständen aufschrauben!!!

Kundenservice

0800-0267735*
0720-513510
+49 700 26773563
* gebührenfrei