
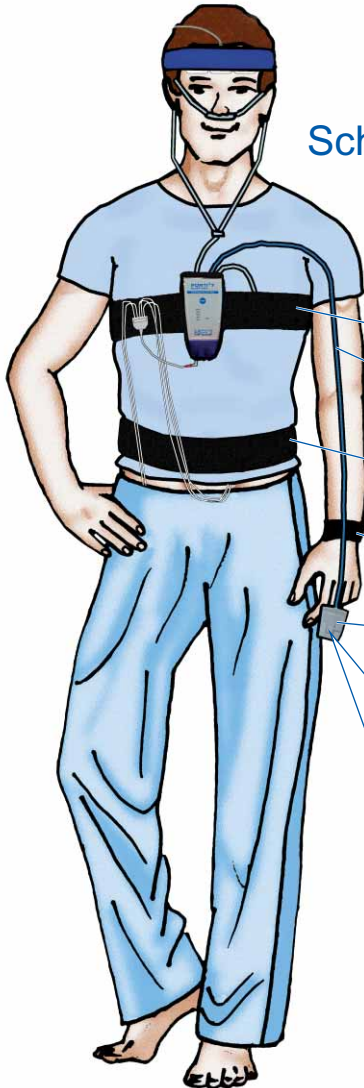
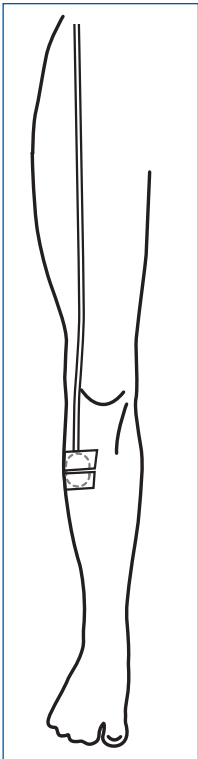
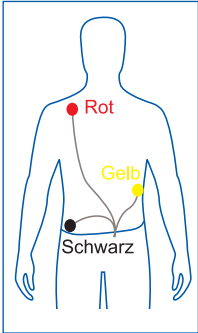


SleepDoc Porti® 7 – Schematische Darstellung

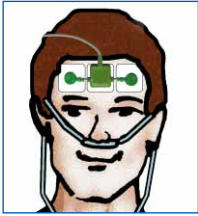


Tragegurt

Blaues Kabel

Abdomengurt

Fixierschleufe

Fingersensor
(Kabel auf Handrücken)

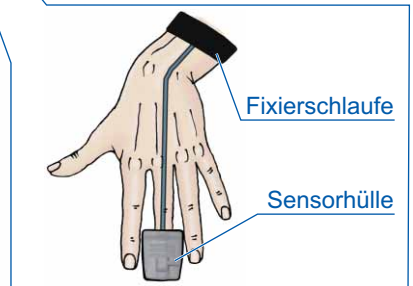

Fixierschleufe

Sensorhülle



ACHTUNG

Die Geräte dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen!
Vor dem Händewaschen muß der Fingersensor sicher
abgelegt werden.

Die Gebrauchsanleitung ist unbedingt zu beachten!

SleepDoc Porti® 7 – Anleitung für den Patienten

1. Bei Aufzeichnung des EKG: Anlegen der EKG-Elektroden lt. umseitiger Abbildung.
2. Gerät mit elastischem Gurt über dem Unterhemd so befestigen, daß das Porti in Rückenlage waagrecht liegt. Der Gurt sollte nicht zu fest sein, jedoch auch nicht verrutschen können.
3. Abdomengurt mit eingestecktem Abdomensensor um den Bauch befestigen. Er sollte etwas unter dem Bauchnabel positioniert sein.

ACHTUNG Der Abdomensensor darf nicht außen stecken, sondern muß innen liegen (zum Körper hin)!

4. Bei Aufzeichnung der Beinbewegung: Anbringen des Beinsensors mit Hilfe eines Klebestreifens lt. umseitiger Abbildung. Der Sensor muss sich bei korrekter Fixierung ca. 10 cm unterhalb des Kniegelenkes und ca. 2–5 cm seitlich des Schienbeines befinden. Darauf achten, dass der Sensor fest auf dem Muskel aufliegt. Keinesfalls darf der Sensor auf dem Schienbein befestigt werden!
5. Bei Aufzeichnung des Stirn-EEG: Stirn mit Alkoholtupfer reinigen. Stirnelektrode mit Hilfe der 3-teiligen Klebe-Elektrode mittig auf der Stirn anbringen.
6. Die Sauerstoffbrille an der Nase anbringen und hinter die Ohren klemmen. Eventuell Brille mit einem Klebeband an den Wangen fixieren. Den Schlauch auf den blauen Adapterschlauch am Portigerät stecken. Bei Maskenträgern den CPAP-Adapterschlauch an der Maske befestigen (Die Sauerstoffbrille entfällt).
7. Nach Möglichkeit den Mittelfingernagel ganz kurz schneiden. Eventuell vorhandenen Nagellack (auch Klarlack) entfernen. Den Finger so in die graue Sensorhülle stecken, daß das Bild mit dem Nagel nach oben zeigt und das Kabel über den Handrücken verläuft.
8. Die Aufzeichnung beginnt automatisch zum vorher in der Praxis festgelegten Zeitpunkt.
9. Während der Aufzeichnung blinkt die grüne LED zu Kontrollzwecken im 4-Sekundentakt.

Fehlermeldung	Ursache	Fehlerbehebung
grüne LED blinkt nicht	Akku ist leer	Akku laden
rote LED leuchtet	fehlerhaftes Pulssignal	Fingersensor und Kabel überprüfen

Am nächsten Morgen

Alle Teile zurück in den Koffer legen. Kompletten Koffer wieder in die Praxis bringen.