

SleepDoc Porti® 7 – Donanım Rehberi


Göğüs kemeri

Mavi kablo

Abdomen kemeri

Cırt cırtlı bilek bandı

Parmak sensörü
(kablo elin üstüne gelecek)

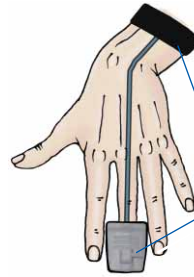

Cırt cırtlı bilek bandı

Sensör kılıfı



Dikkat!

Ekipman su ile temas etmemeli!

Ellerinizi yıkamadan önce mutlaka parmak sensörünü çıkartınız. Lütfen talimatlara uyunuz!

SleepDoc Porti® 7 – Hasta Kullanım Talimatları

1. EKG kayıt için: EKG elektrotları takın (arka sayfada yer alan çizime bakın).
2. Porti cihazın yatarken giydiğiniz kıyafetin üstüne gelecek şekilde kullanın. Cihaz göğsünüzün ortasına gelecek şekilde dik yerleştirilmeli. Boyun kayışından yardım alarak, göğüs kemerini takın. Kemer kaymayacak şekilde ve çok dar olmadan rahat ayarlanmalı.
3. Abdomen kemerini, göbek deliğinize yakın yerleştirip bağlayın.

DİKKAT

Abdomen ve göğüs kemerleri içinde bulunan entegre basınç pedleri vücuda yakın olan kemerlerin iç tarafında olmalı.

4. Bacak hareketleri kaydı için: Bacak sensorlarını yapışkan bant ile bağlayın (arka sayfada yer alan çizime bakın). Eğer sensor doğru bağlandıysa, sensor diz eklemine ~10 cm altında ve incik kemiğinin 2-5 lateralindedir. Sensorun kas üzerinde sıkıca yerleştiğinden emin olun. Sensor asla incik kemiği üzerine yerleştirilmemelidir!
5. EEG kayıt için: 3 parça EEG elektrot şeridi alkol ile temizlenmiş alına yerleştirilmeli.
6. Nazal prongu resimde gözüktüğü gibi kulaklarınızın arkasından gelecek şekilde yüzünüze yerleştirin. Gerekirse nazal prongu yanaklarınıza medikal yapışkanlı bant ile nazıkçe sabitleyebilirsiniz. Hortum ucunu Porti cihazındaki mavi adaptöre yerleştirin.
Eğer maske ile kullanılıyorsa, CPAP adaptör hortumu ile kullanılması gerekir. Bunun için maskeden ufak bir tıpaçın çıkartılarak, hortumun plastik adaptörünün maskenin içine yerleştirilmesi gerekir (Not: Maske kullanırken nazal prong kullanmaya gerek duyulmaz).
7. Mümkünse elinizin orta parmağındaki tırnağınız kısa kesilmeli ve ojesiz olmalı (renksiz oje dahil). Parmağınızı gri parmak sensörünün içine yerleştirin ve sensör üzerindeki parmak resmi yukarıya bakıyor olmalı. Sensör kablosunu cırt cırtlı bant ile elinizin tersine gelecek şekilde ayarlayın.
8. Cihazı klinikte daha önce ayarlanmış olan saatte otomatik olarak açılıp kayıta başlayacaktır.
9. 2 LED ışıktadır. Eğer parmak sensörü doğru takıldıysa kırmızı LED ışık sönecektir. Ölçüm esnasında, ölçümü göstermek amaçlı yeşil LED ışık 4 saniyede bir yanıp sönecektir.

Hata mesajı	Sebebi	Çözüm
Yeşil LED ışık yanıp sönmüyor	Pil bitmiştir	Cihazı tekrar şarj edin
Kırmızı LED yanıp sönmüyor	Yanlış nabız sinyali	Parmak sensörü ve kablosunu denetleyin

Sabah yapılacaklar

Bütün cihaz aksesuarlarını çantasına yerleştirin ve çantayı uyku laboratuvarına teslim edin.